


EsTemp

Cement tymczasowy

Seria cementów tymczasowych **EsTemp** składa się z produktów EsTemp oraz EsTemp NE. Każdy z nich jest przeznaczony do różnych zastosowań takich jak tymczasowe korony i mostki czy cementowanie próbne uzupełnień stałych. EsTemp zawiera tlenek cynku z eugenolem, a EsTemp NE bazuje na tlenku cynku bez eugenolu.

EsTemp

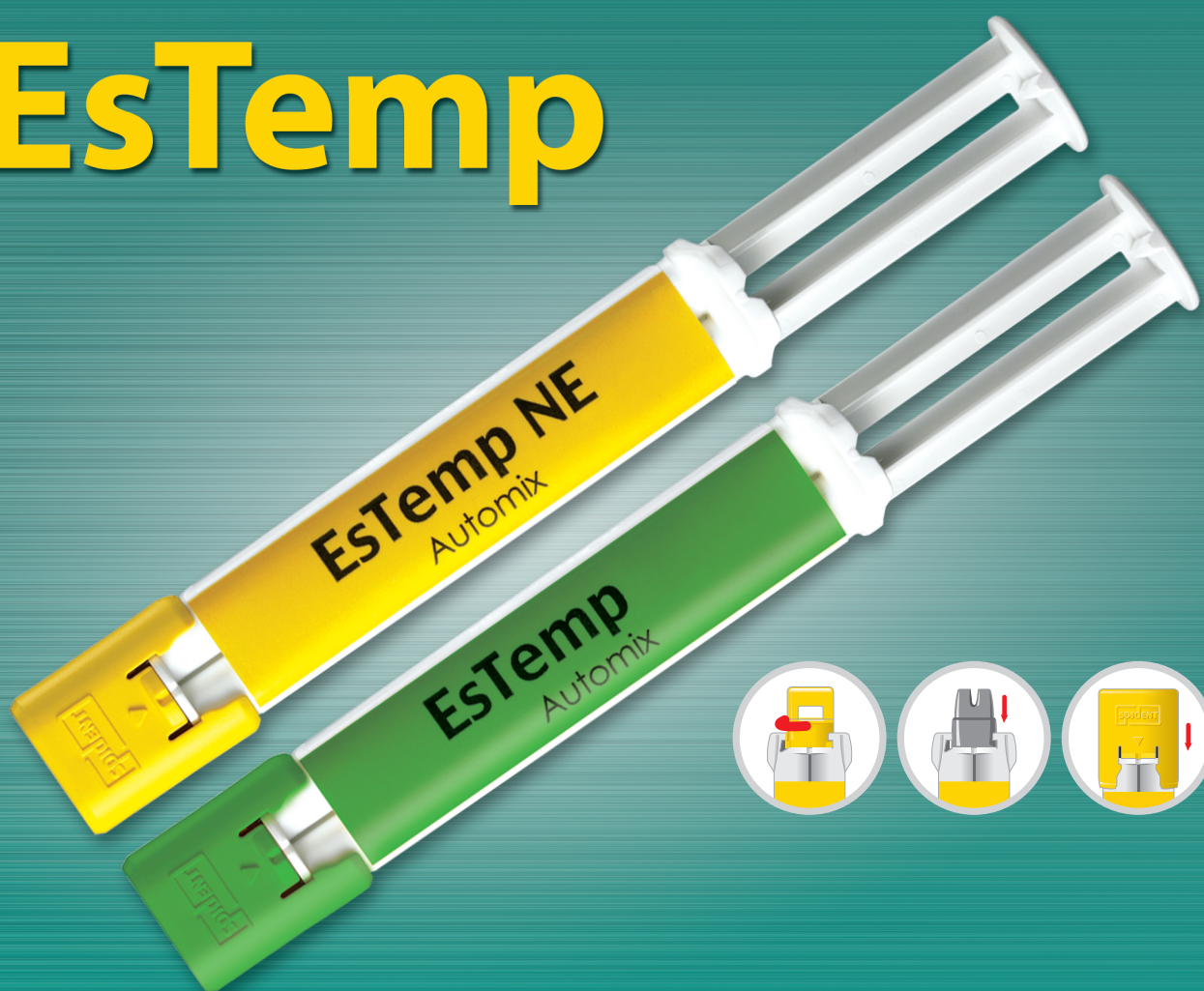


ZALETY

- łatwe mieszanie i zero strat dzięki wygodnym w użyciu strzykawkom
- możliwość użycia końcówki mieszającej
- estetyczny wygląd i cytrynowy smak
- czas wiązania: 1,5 min
- łatwe do usunięcia

EsTemp

APLIKACJA

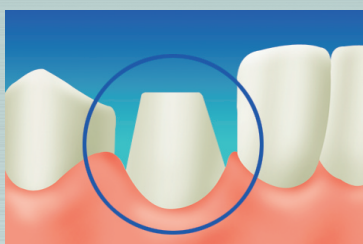

1. Przygotowanie ubytku



2. Nałożenie cementu





3. Sprawdzenie okluzji i usunięcie zbędnego materiału



4. Usunięcie resztek EsTemp po zdjęciu korony

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

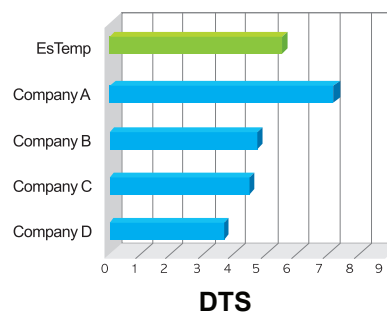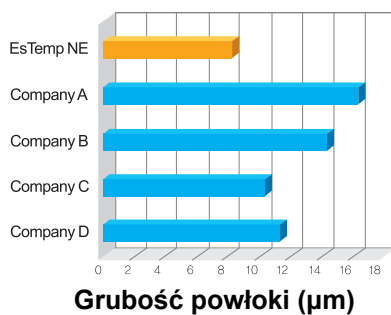

ZAWARTOŚĆ

EsTemp NE: 2 x 10g strzykawka + podkładka do mieszania
 EsTemp (Eugenol): 2 x 10g strzykawka + podkładka do mieszania

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach CEDE
 w dniach 12.09-14.09.2013
 HALA 7 stoisko 7.1.23 HALA 8 stoisko 8.4.3